

DIAMOND[★]PASTE

PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL

INDICAÇÃO:

DIAMOND PASTE é uma pasta que contém Óxido de Alumínio de granulação extra fina, para uso de profissionais da odontologia. O produto oferece um excelente polimento e brilho em porcelanas, resinas, compósitos, esmalte dental e outros materiais restauradores. Possui solubilidade em água, facilitando a remoção após o polimento.

FINALIDADE:

Produto de Uso Profissional Odontológico. É indicada para o polimento de brilho final de Porcelanas, Esmalte, Resinas (inclusive as de laboratórios), e todos os demais tipos de materiais restauradores.

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO:

Produto de Uso Profissional Odontológico. Pasta de polimento à base de Óxido de Alumínio e veículo lubrificante especial. Pasta com coloração branca e aroma de menta.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Ingredientes ativos: Óxido de Alumínio Micronizado
Ingredientes inativos: espessante, óleo mineral, emulsionante, umectante e aroma menta.

CONTEÚDO:

Embalagem contendo 01 seringa com 3g de pasta e 1 ponteira.

MODO DE USO:

- Prepare a região a ser polida deixando-a lisa e no formato final desejado. Se necessário, utilize discos de lixa ou pasta de granulação média para acabamento prévio ao polimento. Esta etapa é de fundamental importância, pois a obtenção de brilho tem forte dependência da condição inicial da superfície.
- Deposite uma pequena quantidade de pasta sobre um disco de feltro ou diretamente sobre a superfície

DIAMOND[★]PASTE

PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL

da peça e proceda o polimento.

- Repita os procedimentos, se necessário, até obter o efeito desejado.

Notas:

1- Utilize baixa rotação e movimentos intermitentes com baixa pressão de aplicação do feltro sobre o dente. Desta forma previne-se o aquecimento da superfície.

2 - Utilize sempre feltros novos para executar um polimento. A contaminação de feltros com abrasivos de outras pastas pode comprometer o sucesso do polimento.

ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES:

- O produto deve ser utilizado conforme descrito nas instruções de uso. Não utilizar o produto para profilaxia ou escovação dental.
- Use o produto em temperatura ambiente.
- Não utilize após a data de validade.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

CUIDADO DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Para melhor conservação do produto mantenha a embalagem sempre devidamente tampada. Não armazene a pasta em geladeira ou em ambientes com temperaturas superiores a 35°C.

Fabricado por:

ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

R. Coronel Rodrigo, 105 - Centro - 12570-000

Aparecida/SP

CNPJ: 17.602.891/0001-59

Autorização de Funcionamento MS: 200101H7M59X

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Elton Garcia dos Reis

CRQ/SP 13402367

Registro MS: 80954610007

SAC: (12) 3311-0214

www.allplan.ind.br

