

PROTECTDAM

PROTETOR GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL

INDICAÇÃO:

PROTECTDAM é indicado para o isolamento dos tecidos gengivas e sulcos durante os procedimentos por contato de produtos que possam causar algum desconforto ou irritabilidade, substituindo o lençol de borracha.

CONTEÚDO:

Embalagem contendo 01 seringa com 3g e 3 ponteiros.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Monômeros de uretano dimetacrilato, monômero metacrilato, sílica, carga inerte, pigmentos, corantes e fotoiniciadores.

DESCRIÇÃO:

O objetivo principal do produto é proteger os tecidos gengivais do contato com peróxido de hidrogênio que contem nos clareadores de consultório e que podem causar desconforto e irritação. O **PROTECTDAM** protege de forma a evitar esse desconforto, garantindo um melhor resultado no tratamento de clareamento dental. É um produto apresentado na forma de gel, que funciona como barreira gengival fotopolimerizável que substitui o lençol de borracha quando o isolamento da gengiva é relativo.

MODO DE USO:

- Secar bem a área da gengiva e dos dentes que será protegida.
- Com auxílio da ponteira, aplique uma camada de aproximadamente 1 mm de largura da barreira gengival sobre a gengiva incluindo as papilas previamente secas.
- Fotopolimerizar o produto aplicado, por 20 a 30 segundos, para cada grupo de 3 à 4 dentes.
- Conferir se toda a barreira gengival foi fotopolimerizada, e se toda a superfície gengival está protegida.

PROTECTDAM

PROTETOR GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL

- Para remover a barreira gengival basta empurrá-la com o auxílio de um instrumento sem corte, até soltar-se por inteiro ou em pedaços grandes.

ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES:

- O manuseio incorreto da polimerização do produto pode acarretar uma leve irritação gengival.
- Não usar o produto em paciente que tenha passado recentemente por algum procedimento cirúrgico bucal ou que tenha qualquer tipo de irritação gengival.
- Interromper o uso do produto imediatamente em caso de reações alérgicas.
- Não injetável.
- Seringa descartável.
- Respeitar o prazo de validade.
- Manter o produto fora do alcance de crianças.

CUIDADO DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Armazenar bem fechado em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Fabricado por:

ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
R. Coronel Rodrigo, 105 - Centro - 12570-000
Aparecida/SP

CNPJ: 17.602.891/0001-59

Autorização de Funcionamento MS:

200101H7M59X

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico: Elton Garcia dos Reis

CRQ/SP 13402367

Registro MS: 80954610001

SAC: (12) 3311-0214

www.allplan.ind.br

