

WHITE EFFECT

H O M E

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

INDICAÇÃO:

WHITE EFFECT OFFICE é indicado para o clareamento profissional odontológico para dentes vitais de uso doméstico (clareador dental caseiro) prescrito e supervisionado pelo dentista.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Peróxido de Hidrogênio a 4%, 6%, 7,5%, ou 10%, Carbômero, Oxalato de Potássio, Fluoreto de Sódio, Gluconato de Cálcio, Estabilizante, Aromatizante, Neutralizante, Umectante, Água Purificada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

O clareador **WHITE EFFECT HOME** é um gel de alta viscosidade com pH neutro (6 - 7) de uso doméstico (auto-aplicação) com acompanhamento de um dentista. O gel é aplicado em uma moldeira individual que é encaixada nas arcadas dentais para manter o gel em contato com o dente. É utilizado durante o dia por um período de 2 a 4 horas diárias, tempos maiores podem ser indicados de acordo com o caso. O tratamento dura de 10 a 14 dias quando o produto é utilizado diariamente. Os resultados podem ser visíveis após 3 a 5 dias de uso.

O Peróxido de Hidrogênio utilizado como princípio ativo na formulação do produto em contato com a superfície dental, decompõe-se em Oxigênio ativo que atinge os pigmentos da estrutura dental oxidando-os e transformando-os em estruturas moleculares menores, que por sua vez não possuem mais coloração e assim deixam de colorir ou pigmentar os dentes.

A formulação contém Cálcio que atua como um agente remineralizador do esmalte melhorando a dureza da superfície dental. O gel clareador também possui sais de Potássio e Flúor que atuam como agentes dessensibilizantes.

MODO DE USO:

Seleção da Concentração

- **White Effect Home 4%** - Pigmentação natural, fumo, café ou ainda quando a sensibilidade manifesta-se com maior intensidade.
- **White Effect Home 6% e 7,5%** - Pigmentação acentuada, com dificuldade de remoção ou para obtenção de resultados visíveis em tempos mais curtos.
- **White Effect Home 10%** - Pigmentação muito acentuada, com muita dificuldade de remoção ou para obter resultados rapidamente visíveis.

NOTA: As concentrações mais altas podem provocar sensibilidade dental.

CUIDADOS COM O PACIENTE:

1 - O paciente deve ser informado sobre todos os passos do tratamento, sendo que, cada pessoa tem um potencial de clareamento diferente e que talvez não obtenha o resultado esperado. Registre a cor dos dentes do paciente e tire fotos para evidenciar os resultados.

2 - As restaurações deverão ser trocadas após o tratamento, pois o produto não clareia restaurações.

3 - O paciente deverá ser examinado antes do tratamento para assegurar que os dentes estejam isentos de infiltrações, trincas, cáries ou de qualquer outro problema que possa provocar dor ou sensibilidade durante o clareamento.

4 - Confeccionar a moldeira e fazer a prova e ajuste no paciente, ensine-o a quantidade de gel a ser aplicada na moldeira evitando o excesso, pois o contato prolongado na gengiva pode causar irritação.

5 - Oriente o paciente a utilizar a pasta PRÓ-DESSENSE se ocorrer aumento da sensibilidade durante o tratamento. Se o paciente apresentar reação alérgica ou demasiado desconforto, deve-se suspender o tratamento e avaliar as causas.

6 - O paciente deve evitar a ingestão de alimentos e bebidas ácidas ou fortemente corados para não comprometer o tratamento.

7 - Disponibilize para o paciente as instruções de uso e oriente-o sobre possíveis intercorrências, como por exemplo: reações alérgicas, aumento da sensibilidade, escurecimento da moldeira devido a restauração com amálgamas e irritação na língua, gengiva, lábios e garganta.

INSTRUÇÕES PARA O PACIENTE:

1 - Lavar bem e secar a moldeira antes do uso.

2 - Retirar a tampa da seringa e colocar uma gota de gel por dente.

3 - Encaixe a moldeira nos dentes e pressione para que o gel envolva-os.

4 - Siga corretamente as instruções do dentista e qualquer desconforto comunique o dentista.

5 - Lavar bem e secar a moldeira antes de guardá-la.

NOTA: Guardar o gel em local limpo, seco e fresco.

ADVERTÊNCIAS E/OU PRECAUÇÕES:

- Pode causar sensibilidade.
- Pode ocorrer irritação na garganta.
- Pode ocasionar queimaduras na gengiva.
- Entrar em contato com a empresa, em caso de alteração do produto.
- Não utilizar produtos fora do prazo de validade.
- Manter o produto longe do alcance das crianças.
- Contra-indicado para gestantes e lactantes.
- **USO ODONTOLÓGICO.**

CUIDADO DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Manter o produto em local limpo, seco e fresco.

Armazenar o produto em temperaturas entre 5 e 37°C.

FABRICADO POR:

ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME

Rua Coronel Rodrigo, 105

Centro, 12570-000 – Aparecida – SP

CNPJ: 17.602.891/0001-59

Autorização de Funcionamento MS: 200101H7M59X

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnico:

Elton Garcia dos Reis CRQ/SP 13402367

Registro MS: 80954610008

SAC: (12) 3105 - 0214

www.allplan.ind.br